



Physibo Walk

GH-3000


1

ICTとロボット技術を活用し、 介護現場のさらなる課題解決を目指す 歩行練習装置

「倒立振り子モデル」に基づく効率的な歩行をサポートする 歩行練習装置

歩行時の股関節の動きを左右のモーターに内蔵された角度センサーで検知し、制御システムがモーターを駆動し、股関節の屈曲による下肢の振り出しの誘導と伸展による下肢の蹴り出しの誘導をおこなえます。

連続歩行だけでなく、ステップ練習にも適応した4つのモードを搭載していますので、装着者の状態に合わせて歩行練習がおこなえます。

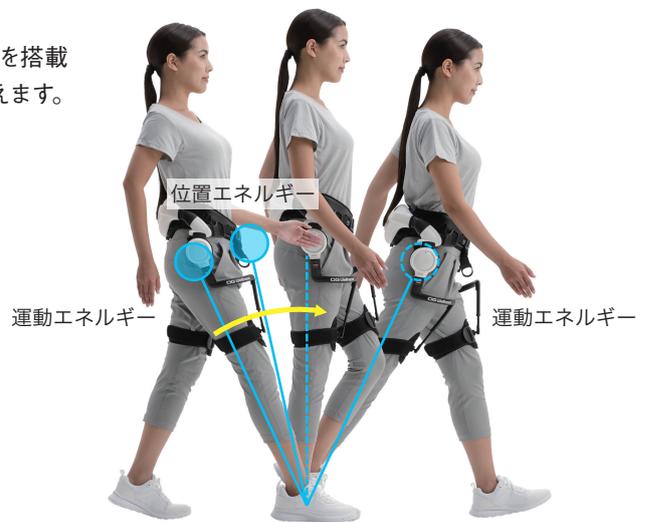

動作の仕組み

装着者の歩きにあわせ、設定したアシストトルクで
股関節の動きを誘導



追従モード	装着者の歩行パターンに合わせて歩行動作を誘導します。
対称モード	装着者の歩行パターンをもとに左右の屈曲・伸展のタイミングが対称になるように誘導します。
ステップモード (1歩/2歩)	連続歩行ではなく、下肢の振り出しや蹴り出し、重心移動の反復練習をアシストします。

小型・軽量化で装着者の負担を軽減

腰フレーム、モーター、大腿フレームの3つで構成され、腰フレームの両側に薄型モーターを配置し、背中部分に制御システムとバッテリーを内蔵しています。重さは2.7kg（バッテリーを含む）と軽量で、装着時の負担を軽減します。



装脱着の時間を短縮するベルト機構

シンプルなベルト機構により簡単に短時間で装脱着できます（装着時間：約60秒、取り外し時間：約10秒）。椅子に座った状態での装着も可能です。腰フレームと大腿フレームのアジャスト機構により、幅広い体格にフィットします。

（装着可能な体格の目安/身長：140cm以上）

立位装着



座位装着



付属のタブレットで簡単操作

装着者の歩行の特徴に応じた練習モードの選択やアシスト力の設定がタブレットにて簡単におこなえます。




使いやすいデータ解析

歩行時の左右対称性・可動範囲・歩行速度などを計測し、付属のタブレットでリアルタイムに確認できます。さらに装着者毎に計測履歴の参照や比較ができ、PCで集計することができます。

※本機器の計測結果に基づく数値は装着者の足の動きを直接計測した数値ではなく、本機器の動きをもとに計測された参考値です。

OG Data Link

Physibo Walkで測定したデータは、付属のタブレットがWi-Fiに接続されている場合、クラウドサーバへのデータ保存が可能です。これにより、施設内でのトレーニング状況の共有等がおこないやすくなります。

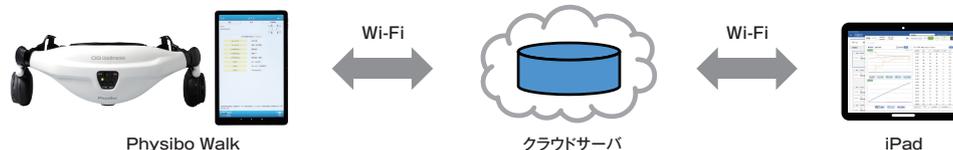

仕様

6年間保証

OG Data Link



Physibo Walk

GH-3000

¥3,200,000 (税別)

品名	歩行アシスト GH-3000
全幅	431mm~494mm
重量	2.7kg(バッテリーを含む)
バッテリー	専用リチウムイオンバッテリー DC22.2V
駆動時間	約1時間/充電時間約1時間
モーター出力	最大トルク4N・m
使用場所	屋内または屋外(雨天時除く)、平地
セット内容	腰フレーム、大腿フレーム標準サイズ、大腿フレームSサイズ、タブレット、バッテリー(2個)、充電器、収納ケース

※本製品の使用可能期間は6年間になります。

※本製品のご利用には利用申込みが必要です。

別売品



01

02



03



04



05



06

	品名	品番	数量	価格
01	大腿フレーム 標準サイズ	GH3500-004L/R	1個	¥140,000(税別)
02	大腿フレーム Sサイズ	GH3500-005L/R	1個	¥140,000(税別)
03	タブレット	GH3500-003W	1個	¥150,000(税別)
04	バッテリー	WD-BA-FC14A	1個	¥110,000(税別)
05	充電器	WD-CH-FC14A	1個	¥145,000(税別)
06	収納ケース	GH3500-001	1個	¥130,000(税別)

<注意事項>

- 本製品は健康増進のための歩行運動や歩行練習の補助を目的とした機器であり、装着者の疾病の判断、治療、予防等を目的とした医療機器ではありません。
- 本製品のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をご参照ください。
- 年1回のメーカー定期点検を受けてください。

<製品のお問合せ>

Physiboサポートセンター

Physibo_support@og-giken.co.jp

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

OG Wellness
Wellness and Beyond

オージー・技研株式会社

オージーウエルネス

検索

【平日受付コールセンター】

☎ 0120-01-7181

受付時間 / 9:00~17:00

【休日受付コールセンター】○休日専用/土・日・祝・年末年始

☎ 0120-33-7181

受付時間 / 9:00~17:00

北日本支店(宮城・山形・福島)
札幌営業所(北海道)
盛岡営業所(岩手・青森・秋田)
北関東支店(埼玉・群馬・栃木・茨城)
新潟営業所(新潟)
南関東支店(東京・山梨)
横浜営業所(神奈川)

千葉営業所(千葉)
中部支店(愛知・岐阜・三重・静岡・長野)
金沢営業所(石川・富山・福井)
関西支店(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)
神戸営業所(兵庫)
中四国支店(岡山・鳥取)
広島営業所(広島・島根・山口)

高松営業所(香川・愛媛・徳島・高知)
九州支店(福岡・大分・熊本・長崎・佐賀)
鹿児島営業所(鹿児島・宮崎)
那覇出張所(沖縄)

岡山本社

〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

東京本社

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

取扱店

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に“非課税”と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2023年12月現在のものです。

S48_2312_335